


VÁLVULAS PS MEDICAL® DELTA®



O SISTEMA DE PRESSÃO FIXA COM
CONTROLE DO SIFÃO

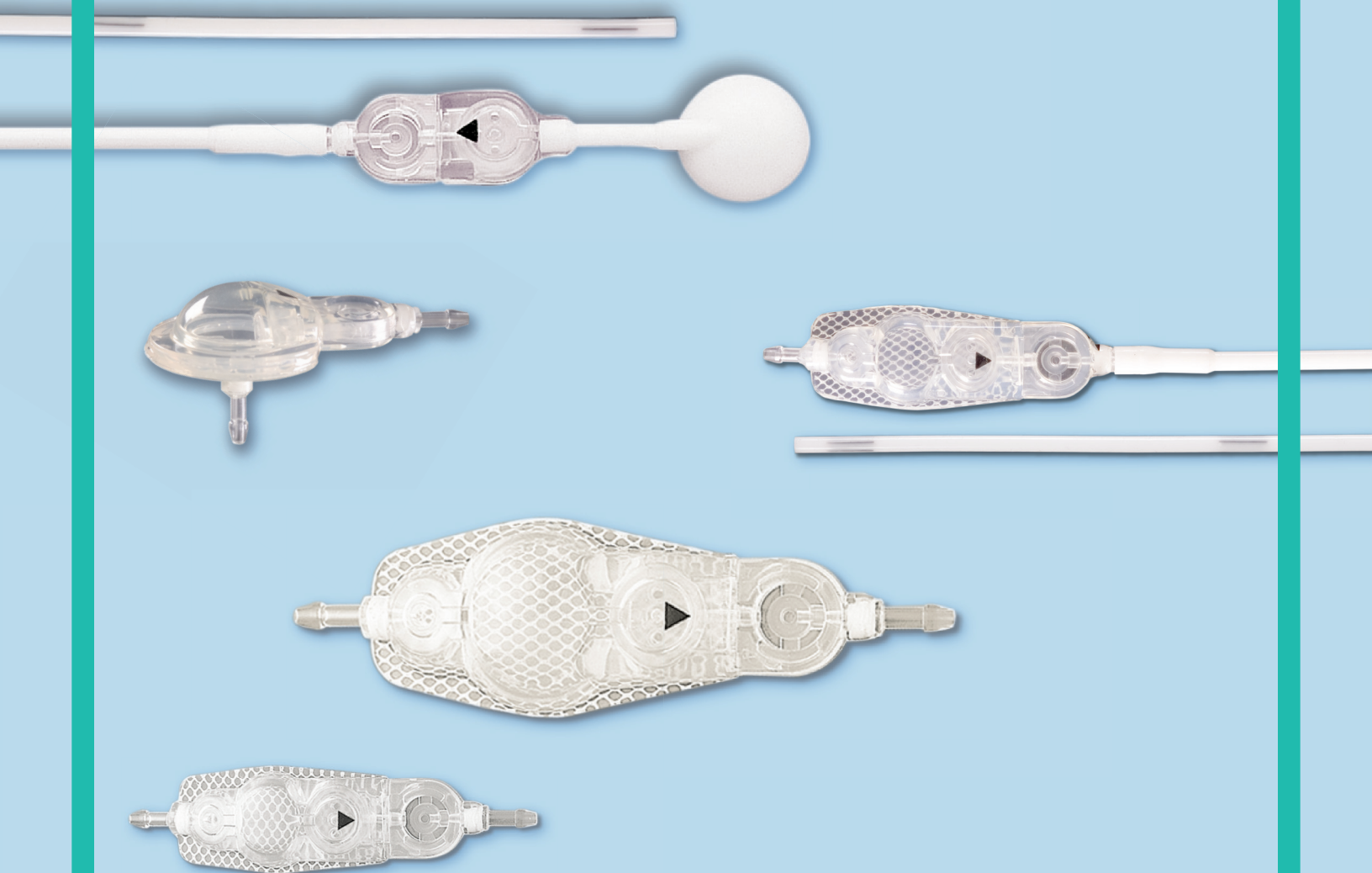

Medtronic
Juntos, Além

Válvulas PS Medical® Delta®


Válvula Contornada Delta

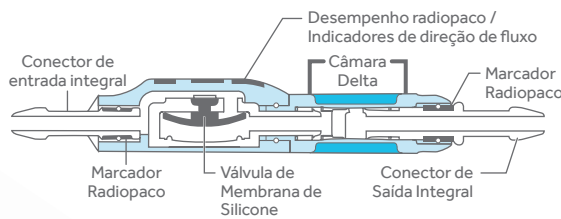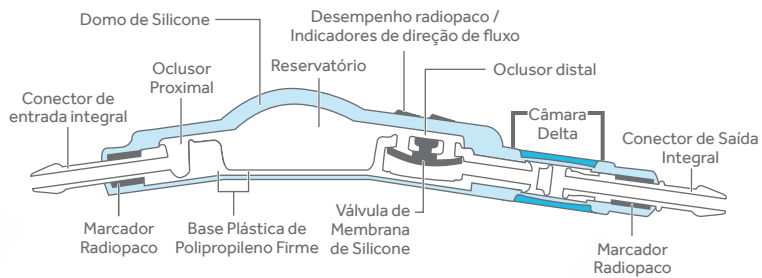

Delta Neonatal



Válvula Delta Bur Hole

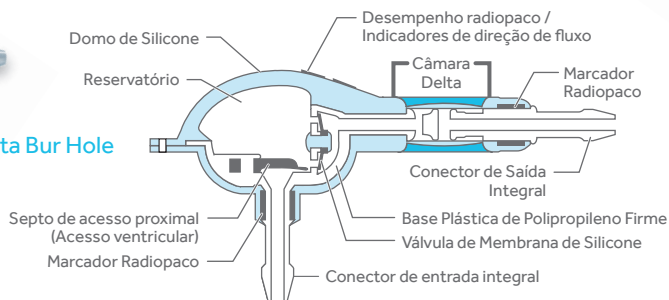


- Incorpora uma válvula em série com um dispositivo de controle de sifão
- Permite que o paciente mantenha a ICP dentro de uma faixa fisiológica, independentemente da taxa de fluxo ou da postura do paciente
- As válvulas são fabricadas com uma membrana de silicone e uma base de polipropileno para reduzir a possibilidade de furar a válvula
- Disponível em uma variedade de configurações, incluindo aquelas com reservatórios centrais para fácil acesso ao CSF
- O design não metálico não interferirá nas tomografias ou ressonância magnética
- O design "snap together" do conjunto de derivação de encaixe Neonatal pode reduzir o tempo de implante

Tecnologia Delta®

Câmara Delta®

A área de entrada é maior em tamanho que a área de saída, permitindo assim que a pressão de entrada positiva domine a Câmara Delta, enquanto minimiza os efeitos da pressão de saída hidrostática negativa.

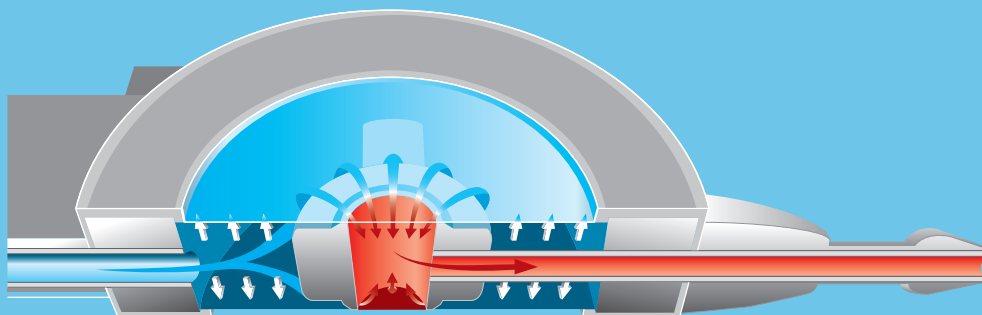


Câmara Delta® (visão ampliada)

O Resultado

O sistema de válvula Delta® mantém um gradiente de pressão quase constante, independentemente da taxa de fluxo ou da postura do paciente.


Delta Valve Performance Levels

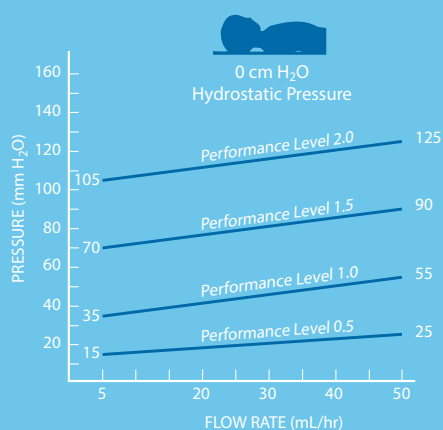

Nota: Os níveis descritos são valores medianos. Todas as válvulas executam dentro de uma faixa de tolerância desses valores medianos quando testadas no momento da fabricação, como segue:

Nível de desempenho 0.5:
+/- 15 mm H2O (5 mL/hr)
+/- 25 mm H2O (50 mL/hr)

Nível de desempenho 1, Nível 1.5, e Nível 2:
+/- 25 mm H2O

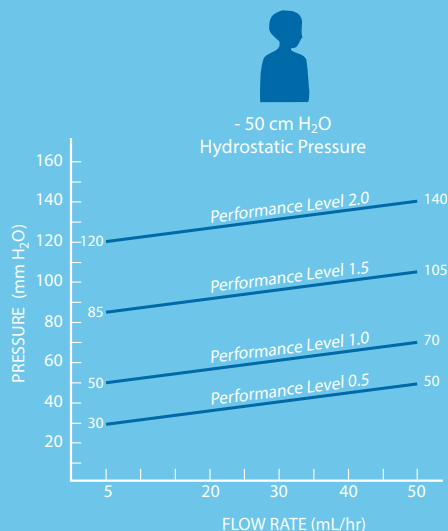

Nota: Os níveis descritos são valores medianos. Todas as válvulas executam dentro de uma faixa de tolerância desses valores medianos quando testadas no momento da fabricação, como segue:


Nível de desempenho 0.5:
+/- 25 mm H2O

Nível de desempenho 1, Nível 1.5, e Nível 2:
+/- 40 mm H2O

Conjuntos de Válvulas PS Medical® Delta®


Válvula Delta

REF No.	Nível de Performance	Tamanho
24147 ...	0.5	Small
42812 ...	1.0	Small
42813 ...	1.5	Small
42814 ...	2.0	Small
24048 ...	0.5	Regular
42822 ...	1.0	Regular
42823 ...	1.5	Regular
42824 ...	2.0	Regular

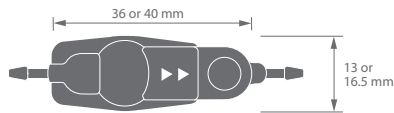


Válvula Delta, Bur Hole

REF No.	Nível de Performance	Diâmetro
42830 ...	0.5	12 mm
42832 ...	1.0	12 mm
42833 ...	1.5	12 mm
42834 ...	2.0	12 mm
42840 ...	0.5	16 mm
42842 ...	1.0	16 mm
42843 ...	1.5	16 mm
42844 ...	2.0	16 mm

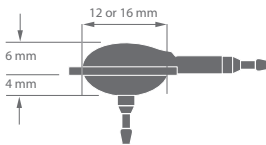


Válvula Delta, Neonatal

REF No.	Nível de Performance	Tamanho
27219-1	1.0	Neonatal
27219-5	1.5	Neonatal
27219-2	2.0	Neonatal

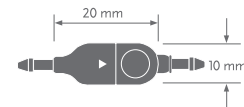

Conjunto de Válvulas Unitizados Delta


REF No.	Nível de Performance	Tamanho
24013-1	1.0	Regular
24013-5	1.5	Regular
24013-2	2.0	Regular

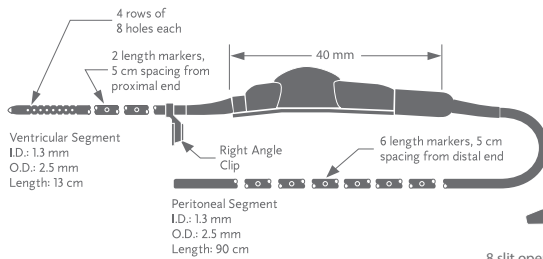

Conjunto de Válvulas Delta


com cateter peritoneal descartável, 60 cm

REF No.	Nível de Performance	Tamanho
46812	1.0	Small
46813	1.5	Small
46814	2.0	Small
46822	1.0	Regular
46823	1.5	Regular
46824	2.0	Regular

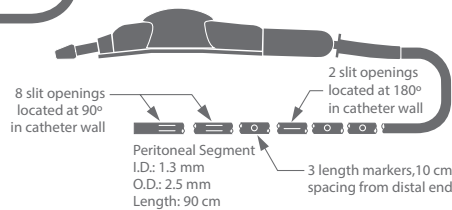

Conjunto de Válvulas Delta Snap

REF No.	Nível de Performance	Tamanho
46832	1.0	Neonatal
46833	1.5	Neonatal
46834	2.0	Neonatal
24028-1	1.0	Regular
24028-5	1.5	Regular
24028-2	2.0	Regular
24027-1	1.0	Small
24027-5	1.5	Small
24027-2	2.0	Small

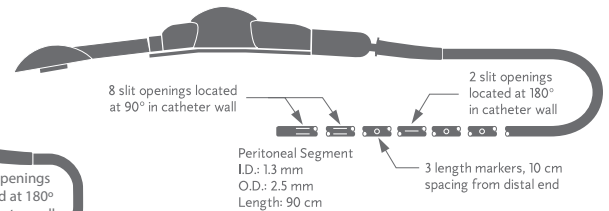

Registro ANVISA nº: 10099430001

Av. Jornalista Roberto Marinho, 85
Cidade Monções, São Paulo - SP
CEP 04576-010
Brasil
Telefone: +55 11 2182-9200

Medtronic
Juntos, Além